


Mesorb®

Pansement ultra absorbant
avec barrière contre les fuites

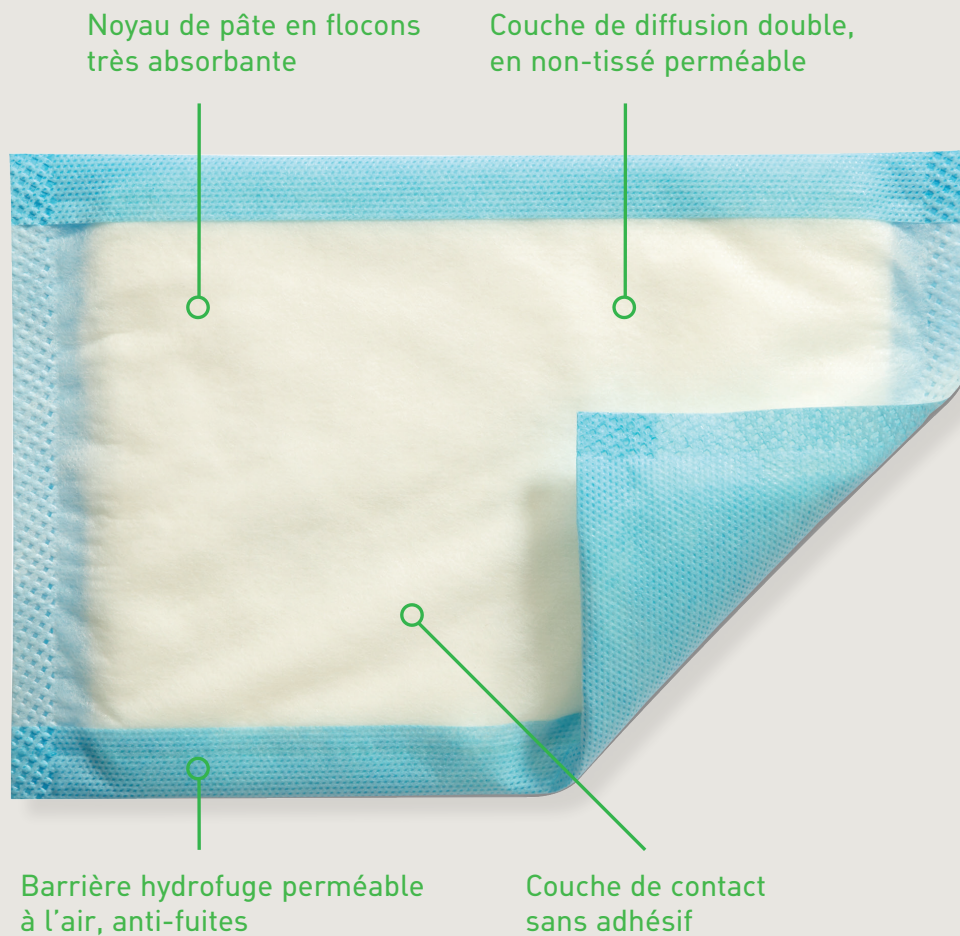


- Mesorb® est un pansement très absorbant qui retient de grandes quantités d'exsudats. Sa barrière hydrofuge exclusive réduit la fréquence des pansements et empêche les vêtements et la literie d'être souillés.


Mode d'emploi



1. Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie de 2-4 cm.

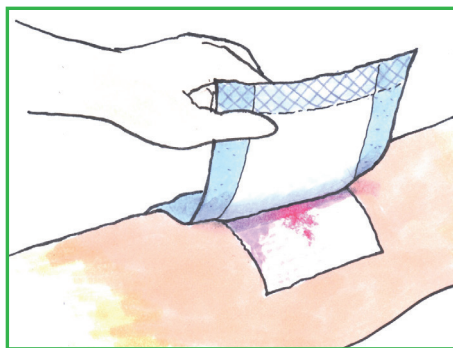

2. Déposer Mesorb® sur le pansement primaire ou directement sur la plaie.

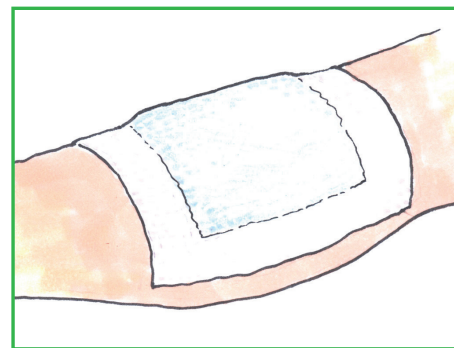

3. Fixer avec du ruban siliconé Mepitac®, du ruban tissé Mefix® ou un produit de fixation sans adhésif.

How Mesorb® works

La couche de contact et la couche de diffusion entraînent l'exsudat dans le noyau très absorbant. Le noyau retient l'exsudat tout en procurant protection et ventilation de la plaie.

La barrière imperméable empêche la contamination et les épanchements qui risquent de souiller les vêtements et la literie. Comme elle couvre les bords du pansement, elle bloque les fuites latérales.

Avantages de Mesorb®

- Très absorbant
- Scellé tout autour
- Bon rapport qualité-prix
- Barrière hydrofuge exclusive qui réduit la fréquence des pansements et empêche les vêtements et la literie d'être souillés.

Sélection Mesorb®

(Emballage stérile)

No d'article	Produit cm	Coussinet cm	Pcs/boîte	Pcs/caisse
677001	10 x 10	10 x 13	50	400
677201	10 x 15	13 x 15	50	300
677401	10 x 20	10 x 23	50	300
677601	15 x 20	15 x 23	50	300
677701	20 x 25	23 x 25	30	120
677801	30 x 20	23 x 30	30	120

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Indications*

Mesorb® est indiqué dans le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives.

Il peut être utilisé comme pansement primaire (directement sur la plaie) ou comme pansement secondaire lorsqu'une haute capacité d'absorption est nécessaire.

Fréquence des pansements

Mesorb® may be left in place for several days, depending on the wound and skin condition, or as indicated by a healthcare professional.

Précautions*

- Mesorb® ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.

